

Dentium Bright Impress - Putty 제품을 사용하기 전 담당의사 및 시술자는 본 사용자설명서 및 관련된 모든 제품별 정보들을 숙지하고 반드시 준수하십시오. 제품의 사용에 관해서는 Dentium에서 주최하는 적절한 사용자 교육 과정에 참석할 것을 권장합니다. 관련된 문서와 교육 과정의 세부사항 및 일정은 홈페이지 또는 영업 담당자로부터 얻을 수 있습니다.

제품의 취급, 부적절한 사용, 취급 만료된 제품의 사용, 오염된 기기 사용 등으로 인한 부작용이나 합병증에 따른 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 제품의 기능, 취급 및 필요한 관리 절차의 위험에 대해 환자에게 올바르게 지시하고 알리는 것은 사용자의 의무입니다.

1 사용목적

본 제품은 반응에 따라 인상채득에 적합한 고무재료를 형성하는 폴리실록산 탄성재료이다.

2 사용 전의 준비사항

- 1) 사용 전 제품의 유효기간, 이물질 및 불순물 여부, 변질 등 제품의 이상 상태를 확인 한 후 사용합니다.
- 2) 제조자의 사용설명서를 숙지한 후 사용방법을 준수합니다.

3 조작방법

- 1) Catalyst 와 Base를 1:1 비율로 30초간 균일하게 혼합한다. 혼합시 라텍스 장갑이나 고무재질의 장갑은 경화 방해가 일어나므로 사용하지 않는다.
- 2) 완전 혼합된 재료를 트레이에 올린 후 환자의 구강내로 가져간다.
- 3) 트레이를 구강내 삽입하여 구강내에서 인상재가 완전히 경화될 때 까지 구강 내에 위치시킨다.
- 4) 완전히 경화된 후 트레이를 구강내에서 제거하여 인상을 획득한다.

4 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 사용한 스푼은 Catalyst와 Base를 구분하여 보관한다.
- 2) 용기의 뚜껑을 완전히 밀봉한 채로 보관한다.

5 사용시 주의사항

- 1) 사용은 의사, 치과전문가가 사용하여야 하며 사용방법, 사용 시 주의사항을 준수한다.
- 2) 인체 유해성은 접촉성 피부염(알레르기반응)과 이물질 반응이다.
- 3) 환자의 구강점막, 입술, 또는 얼굴 피부에 접촉하는 경우 알레르기 반응을 나타낼 수 있으며, 알레르기 반응은 주로 발진성 피부염의 형태를 보인다.
- 4) 본 제품 사용 중 알레르기 반응 등의 과민증상이 나타난 환자는 사용을 중지한다.

- 5) 인상채득시 인상재의 찢긴 조각이 잇몸에 남아 있을 경우 이물질 반응으로 염증 및 부종을 일으킬 수 있다.
- 6) 본 제품은 사용 중 옷이나 피부에 묻었을 경우 세제와 물로 세척한다.
- 7) 유효기간이 경과한 경우 폐기한다.
- 8) 본 제품은 용도 이외의 사용이나 비전문가의 사용을 금지한다.
- 9) 어린이, 노약자가 다루지 않도록 하며, 직사광선, 화기에 주의한다.
- 10) 인상재 사용 후 뚜껑을 잘 닫는다.

6 저장방법

직사광선 및 습기를 피해 상온보관

7 제조자 정보

- 7.1 제조자명: (주)덴티움 광고공장
- 7.2 소재지: 제품 라벨 참조
- 7.3 홈페이지: WWW.DENTIUM.CO.KR

8 부작용 보고 관련 문의처

- 8.1 한국의료기기안전정보원 (Tel. 080-080-4183)

■ Labeling Symbol

	Batch 코드, LOT 번호		포장 손상 시 사용금지
	카탈로그 번호		보관온도
	제조사		제조년월일
	유효기간		사용자 설명서 참조
	주의, 동봉문서 참조		재사용 금지