

Dentium Bright Impress - Bite 제품을 사용하기 전 담당의사 및 시술자는 본 사용자설명서 및 관련된 모든 제품별 정보들을 숙지하고 반드시 준수하십시오. 제품의 사용에 관해서는 Dentium에서 주최하는 적절한 사용자 교육 과정에 참석할 것을 권장합니다. 관련된 문서와 교육 과정의 세부사항 및 일정은 홈페이지 또는 영업 담당자로부터 얻을 수 있습니다.

제품의 취급, 부적절한 사용, 취급 만료된 제품의 사용, 오염된 기기 사용 등으로 인한 부작용이나 합병증에 따른 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 제품의 기능, 취급 및 필요한 관리 절차의 위험에 대해 환자에게 올바르게 지시하고 알리는 것은 사용자의 의무입니다.

1 사용목적

본 제품은 상하악 관계를 기록하기 위해서 치아 경조직에 사용하는 치과재료로 왁스, 폴리에씨, 실리콘 등의 재료이다. 단, 구강내 인상채득을 위한 인상재는 여기서 제외한다.

2 사용 전의 준비사항

- 1) 사용 전 제품의 유효기간, 이물질 및 불순물 여부, 변질 등 제품의 이상 상태를 확인 한 후 사용합니다.
- 2) 제조자의 사용설명서를 숙지한 후 사용방법을 준수합니다.

3 조작방법

- 1) 50ml 믹싱건에 카트리지를 삽입합니다. 이때 카트리지의 믹싱팁 장착부위 반대편인 아랫부분의 홈이 아랫방향으로 향하도록 해야 합니다. 카트리지가 믹싱건에 정확히 장착되지 않으면 믹싱건의 덮개가 닫히지 않습니다.
- 2) 카트리지 마개를 제거합니다. 카트리지 마개는 처음 개봉하여 사용하신 이후에 재사용이 가능합니다.
- 3) 믹싱건을 이용하여 Base와 Catalyst가 같은 양이 나올 정도만 조금 짜내어 줍니다.
- 4) 믹싱팁을 장착한 뒤 시계방향으로 90도 돌려 장착을 완료합니다.
- 5) 치아 교합면을 완전히 건조시킨다.
- 6) 치아 교합면에 탄성교합인기재를 주사한 후 제품이 완전히 경화되기 까지 2분 정도 환자로 하여금 껍 다물고 있도록 한다.
- 7) 경화된 탄성교합인기재를 제거하고 물과 표준세척용액으로 깨끗이 세척한다.

4 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 15~25 °C의 건조한 실내에서 보관하시고 직사광선에 노출을 피해 주시기 바랍니다.
- 2) 사용 후 즉시 용기 뚜껑을 닫고 용기 뚜껑이 바뀌지 않도록 유의하여 보관한다.

5 일반적 주의

- 1) 사용은 의사, 치과전문가이어야 하며, 사용방법, 사용 시 주의사항을 준수하여야 한다.
- 2) 사용 시 피부와 눈에 접하지 않도록 한다.
- 3) 어린이, 노약자가 다루지 않도록 한다.
- 4) 교합인기용 재료의 원자재에 대하여 과민반응을 나타내는 환자에게는 사용하지 않는다.
- 5) 사용기한이 지난 경우에는 사용하지 않도록 한다.

6 적용상의 주의

- 1) 액화된 제품이나 폴리에스테르 타입의 교합인기용 재료와 섞지 않는다.
- 2) 치과용으로 교합채득 목적 이외에 사용하지 않도록 한다.
- 3) 유교 용액이나 액체에 닿거나 넣지 않도록 한다.

7 제조자 정보

- 7.1 제조자명: (주)덴티움 광고공장
- 7.2 소재지: 제품 라벨 참조
- 7.3 홈페이지: WWW.DENTIUM.CO.KR

8 부작용 보고 관련 문의처

- 8.1 한국의료기기안전정보원 (Tel. 080-080-4183)

■ Labeling Symbol

	Batch 코드, LOT 번호		포장 손상 시 사용금지
	카탈로그 번호		보관온도
	제조사		제조년월일
	유효기간		사용자 설명서 참조
	주의, 동봉문서 참조		재사용 금지