

Dentium Bright Primer 제품을 사용하기 전 담당의사 및 시술자는 본 사용자설명서 및 관련된 모든 제품별 정보들을 숙지하고 반드시 준수하십시오. 제품의 사용에 관해서는 Dentium에서 주최하는 적절한 사용자 교육 과정에 참석할 것을 권장합니다. 관련된 문서와 교육 과정의 세부사항 및 일정은 홈페이지 또는 영업 담당자로부터 얻을 수 있습니다.

제품의 취급, 부적절한 사용, 취급 만료된 제품의 사용, 오염된 기기 사용 등으로 인한 부작용이나 합병증에 따른 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 제품의 기능, 취급 및 필요한 관리 절차의 위험에 대해 환자에게 올바르게 지시하고 알리는 것은 사용자의 의무입니다.

1 사용목적

본 제품은 치과용 도재 또는 세라믹으로 제작한 치과수복물 또는 기기와, 레진계 재료를 접착하기 위해 사용하는 싼란계 중개재이다.

2 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 오염도 및 파손 여부를 확인 후 사용한다.
- 2) 사용 설명서를 숙지하고 설명서에 따라 취급한다.

3 사용방법 및 조작 순서

1) 수복물 준비 (전처리 표면 준비)

① 지르코니아

- 수복물 표면을 샌드블라스트한다. (수복물 제조사의 지시사항 참조)
- 이후, 수복물을 초음파 세척기로 세척한다. (1분 이내, 알코올 사용)
- 수복물을 워터 스프레이로 완전 세척 후, 기름을 함유하지 않은 에어로 건조한다.

② 리튬 디실리케이트 글라스-세라믹

- 수복물을 5% 불산으로 20초간 에칭한다 (수복물 제조사의 지시사항 참조)
- 이후, 수복물을 초음파 세척기로 세척한다. (1분 이내, 알코올 사용)
- 수복물을 워터 스프레이로 완전 세척 후, 기름을 함유하지 않은 에어로 건조한다.

③ 메탈, 메탈-지지 수복물

- 수복물 표면을 샌드블라스트한다. (수복물 제조사의 지시사항 참조)
- 이후, 수복물을 초음파 세척기로 세척한다. (1분 이내, 알코올 사용)
- 수복물을 워터 스프레이로 완전 세척 후, 기름을 함유하지 않은 에어로 건조한다.

2) 전처리된 표면 (지르코니아: 샌드블라스트, 글라스-세라믹: 불산 에칭, 메탈: 샌드블라스트) 마이크로브러시를 사용하여 본 제품을 1~2회 코팅한다.

3) 도포 후 3-way syringe로 약 5초간 건조한다.

4) 제조사의 사용설명서에 따라, 합착용 복합레진 (예. Bright Resin Cement)을 사용하여 수복물을 고정한다.

4 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 사용 후, 즉시 캡을 닫아 용매의 휘발을 최소화한다.
- 2) 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온 (25°C 이내)에 보관한다.

5 사용시 주의사항

본 제품의 사용 시 주의사항은 다음과 같다.

- 1) 환자가 본 제품의 성분에 알러지가 있는 경우 사용을 금한다.
- 2) 전 과정에서 타액, 혈액 또는 물의 오염을 반드시 피한다. 오염된 경우, 수복물 세척부터 다시 진행한다.
- 3) 오염의 문제가 있기 때문에 본 제품 내에 브러시를 삽입하지 않는다.
- 4) 사용 후, 즉시 캡을 닫아 용매의 휘발을 최소화한다.
- 5) 표시된 만료일 이후에는 본 제품을 사용하지 않는다.
- 6) 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온 (25°C 이내)에 보관한다.
- 7) 어린이의 손이 닿지 않도록 주의한다.

6 제조자 정보

- 6.1 제조자명: (주)덴티움 광고공장
- 6.2 소재지: 제품 라벨 참조
- 6.3 홈페이지: WWW.DENTIUM.CO.KR

7 부작용 보고 관련 문의처

- 7.1 한국의료기기안전정보원 (Tel. 080-080-4183)

■ Labeling Symbol

	Batch 코드, LOT 번호		포장 손상 시 사용금지
	카탈로그 번호		보관온도
	제조사		제조년월일
	유효기간		사용자 설명서 참조
	주의, 동봉문서 참조		재사용 금지