

Dentium Bright PMMA Block 제품을 사용하기 전 담당의사 및 시술자는 본 사용자설명서 및 관련된 모든 제품별 정보들을 숙지하고 반드시 준수하십시오. 제품의 사용에 관해서는 Dentium에서 주최하는 적절한 사용자 교육 과정에 참석할 것을 권장합니다. 관련된 문서와 교육 과정의 세부사항 및 일정은 홈페이지 또는 영업 담당자로부터 얻을 수 있습니다.

제품의 취급, 부적절한 사용, 취급 만료된 제품의 사용, 오염된 기기 사용 등으로 인한 부작용이나 합병증에 따른 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 제품의 기능, 취급 및 필요한 관리 절차의 위험에 대해 환자에게 올바르게 지시하고 알리는 것은 사용자의 의무입니다.

1 사용목적

본 제품은 영구 수복 피복관, 브릿지 등의 보철물을 제작하기 위한 치과용 고분자 재료이다.

2 사용 전 준비사항

- 1) 이물질, 불순물, 유효기간 등 제품의 이상 유무를 확인한다.
- 2) 제품의 색상 및 형태를 확인한다.
- 3) 사용방법을 미리 숙지하고 준수한다.

3 사용방법 및 주의사항

- 1) 모델링 데이터를 준비하고 블록을 준비한다.
- 2) CAD/CAM 밀링기에 장착하고 가공한다.
- 3) 가공 후 지지대 부분은 삭제한다.
- 4) 절삭이 끝난 다음, 통상적인 가공법에 따라, 표면 처리한다.

4 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 치과관련 종사자가 아닌 자의 접촉을 피한다.
- 2) 직사광선이 닿지 않는 실온에서 보관한다.
- 3) 절삭 가공된 완제품은 일회용이므로 재사용하지 않는다.

5 경고

본 제품의 사용자는 국가에서 인정한 치과 전문가로 사용 방법 및 주의 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 아크릴 레진에 대한 발진, 피부염 등의 과민성 병력이 있는 환자는 사용을 금해야 한다.
- 2) 본 제품으로 인한 작업실의 기술자가 과민반응이 나타나는 경우 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담 한다.

6 일반적 주의

- 1) 제품에 불순물, 이물질 등이 있거나 변색 등의 이상이 있는 경우 사용하지 않도록 한다.
- 2) 정해진 용도 이외의 타 용도로 사용하는 것을 금한다.
- 3) 광택 작업 시 마스크나 고글 등과 같은 보호장비를 사용한다.
- 4) 직사광선을 피해 보관해야 한다.

7 금기증

- 1) 제어할 수 없는 당뇨병 환자, 과도한 흡연이나 알코올 중독자
- 2) 화학요법과 방사선 치료로 인해 면역기능이 부족한 환자
- 3) 특이한 알레르기 반응을 나타내거나 민감한 환자
- 4) 기타 보철 치료에 적합하지 않은 환자

8 저장방법

본 제품은 직사광선을 피하고 실온에서 보관한다.

9 제조자 정보

- 9.1 제조자명: (주)덴티움 광고공장
- 9.2 소재지: 제품 라벨 참조
- 9.3 홈페이지: WWW.DENTIUM.CO.KR

10 부작용 보고 관련 문의처

- 10.1 한국의료기기안전정보원 (Tel. 080-080-4183)

■ Labeling Symbol

	Batch 코드, LOT 번호		포장 손상 시 사용금지
	카탈로그 번호		보관온도
	제조사		제조년월일
	유효기간		사용자 설명서 참조
	주의, 동봉문서 참조		재사용 금지