

Dentium rainbow TM High Shine 제품을 사용하기 전 담당의사 및 시술자는 본 사용자설명서 및 관련된 모든 제품별 정보들을 숙지하고 반드시 준수하십시오. 제품의 사용에 관해서는 Dentium에서 주최하는 적절한 사용자 교육 과정에 참석할 것을 권장합니다. 관련된 문서와 교육 과정의 세부사항 및 일정은 홈페이지 또는 영업 담당자로부터 얻을 수 있습니다.

제품의 취급, 부적절한 사용, 취급 만료된 제품의 사용, 오염된 기기 사용 등으로 인한 부작용이나 합병증에 따른 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 제품의 기능, 취급 및 필요한 관리 절차의 위험에 대해 환자에게 올바르게 지시하고 알리는 것은 사용자의 의무입니다.

1 사용목적

본 제품은 인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 도재로서 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조유닛으로 절삭가공하는 도재이다.

2 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전에 내용물을 점검한 후 포장의 손상이나 제품의 이상 흔적이 발견되면 사용하지 말 것
- 2) 내용물의 형명을 확인할 것

3 사용방법 및 조작순서

- 1) 포장을 개봉하여 이물질이나 불순물이 없는지 확인한다.
- 2) 인상을 채득한 후 working model을 준비하고, 환자에 맞는 블록을 case에 따라 치과용 MAD/MAM 또는 CAD/CAM system 으로 가공할 준비를 한다.
- 3) 지르코니아 블록을 각 시스템에 맞는 plate에 설치한다.
- 4) 각 시스템의 사용설명서에 따라 블록을 가공한다.
- 5) 블록에 추가로 shade 염색을 하고자 할 경우 해당 색상 용액 제조회사의 사용방법에 따른다.
- 6) 가공된 블록을 furnace에 넣고 형상에 구분 없이 1,450~1,550°C에서 2시간동안 소결한다.
- 7) 소결이 끝난 블록의 형태수정이 필요한 경우, 열이 발생하지 않도록 water turbine을 사용하여 주의해서 작업한다.
※ 소결이 끝난 블록에 열이 가해지면 물성변화로 crack의 원인이 될 수 있음
- 8) 소결이 끝난 블록은 가급적 sand blasting 처리를 하지 않는다. 만약 표면에 sand blasting이 필요할 경우, 2 bar 정도의 압력으로 margin 부위를 주의해서 표면처리 한다.
- 9) 소결 후 build-up하기 전 1,000°C 부근에서 열처리를 시행하는 것이 특성을 향상시킬 수 있다.
- 10) 형태 수정과 표면처리 후 steam cleaner를 이용하여 세척한다.

4 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 가공 시 남은 부분은 직사광선을 피해 실온에서 보관한다.
- 2) 1회에 한하여 사용하며, 사용한 부분을 재사용하지 않는다

5 부작용

- 1) 4本 이상의 Bridge 케이스에 적용할 경우 파절이 생길 수 있다.
- 2) 코어디자인과 시술계획이 올바르지 않은 경우, 상부 포세린 층이 깨질 수 있다.

6 사용시 주의사항

- 1) 3本 Bridge 이하 Case만 권장한다.
- 2) 강한 충격을 주지 않는다.
- 3) 가공시 ceramic dust의 흡입 또는 피부에 닿지 않도록 고글이나 마스크 등 보호용구를 착용한다.
- 4) 가공기법은 특별하고 복잡한 절차를 필요로 한다. 절삭가공용 치과도재에 대한 기공사의 정식 트레이닝을 권장한다.
- 5) 술자는 본 제품의 수술도구를 이용한 수술 방법과 임상적응증, 주의사항 등에 대하여 완벽하게 숙지해야 한다.
- 6) 사용시 ceramic powder나 liquid가 눈에 닿지 않도록 한다.
- 7) 표면의 흠이나 날카로운 모서리는 소결 후 제품의 안정성을 크게 저해할 수 있으므로, 제거되거나 부드럽게 마무리되어야 한다.
- 8) Furnace를 통해 달구어진 어떤 제품의 표면이라도 손으로 만지지 않는다.
- 9) 소결이 끝난 core에 열이 가해지면 물성의 변화로 crack의 원인이 발생할 수 있다.
- 10) 완성된 도재치아의 접착방법 : 일반적으로 사용되고 있는 치과용 접착재료의 사용방법을 따라 접착한다.

※ 추가되는 도재의 축성을 위한 소성과 관련한 도재의 조건 및 주의사항

- ① 지르코니아 블록의 열팽창계수와 맞는 지르코니아 전용도재를 사용해야 한다.
- ② 소성온도는 추가되는 도재의 판매회사마다 각기 다르므로, 각 제조회사 제품의 매뉴얼에 따른다.

7 저장방법

직사광선을 피해 실온에서 보관

8 제조자 정보

8.1 제조자명: (주)덴티움 광고공장

8.2 소재지: 제품 라벨 참조

8.3 홈페이지: WWW.DENTIUM.CO.KR

9 부작용 보고 관련 문의처

9.1 한국의료기기안전정보원 (Tel. 080-080-4183)

■ Labeling Symbol

	Batch 코드, LOT 번호		포장 손상 시 사용금지
	카탈로그 번호		보관온도
	제조사		제조년월일
	유효기간		사용자 설명서 참조
	주의, 동봉문서 참조		재사용 금지